


MEDOJECT®

Рекомендації щодо застосування стерильної голки для ін'єкцій MEDOJECT

CE
2460

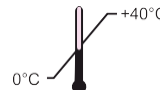

STERILE EO

Опис : Стерильна голка для ін'єкцій, одноразового використання. Стерильна, нетоксична, апірогенна.


Область застосування: Для ін'єкційного введення лікарських препаратів (підшкірного, внутрішньом'язового, внутрішньовенного), а також для забору фізіологічних рідин у пацієнтів.



1. Перед використанням перевірте термін дії стерильності, комплектність упаковки, серійний номер і термін придатності;
2. Голки повинні бути використані відразу після відкриття штучної упаковки і повинні стати недоступними для подальшого застосування після використання;
3. Якщо штучна упаковка пошкоджена або ж термін дії вже закінчився, використання продукту не дозволяється;
4. Застосовувати продукт має право тільки кваліфікований лікар, або медичний працівник;
5. Тільки для одноразового використання. Після одного використання голку необхідно утилізувати;
6. Даний виріб не містить фталати DEHP;
7. Повторна стерилізація або ж повторне використання можуть викликати інфекцію або ж взаємну перехресну дію.



1. Перед використанням перевірте цілісність кожної окремої упаковки. Якщо упаковка пошкоджена, не використовуйте її;
2. Перед використанням, відкрийте індивідуальне пакування голки;
3. Кожна використана голка вважається зараженою і відразу після її використання повинна бути ліквідована в належний контейнер;
4. Після одного використання ліквідуйте її безпечним способом, щоб уникнути ризику зараження;
5. Тримайте руки позаду вістря голки протягом усього часу використання та утилізації.

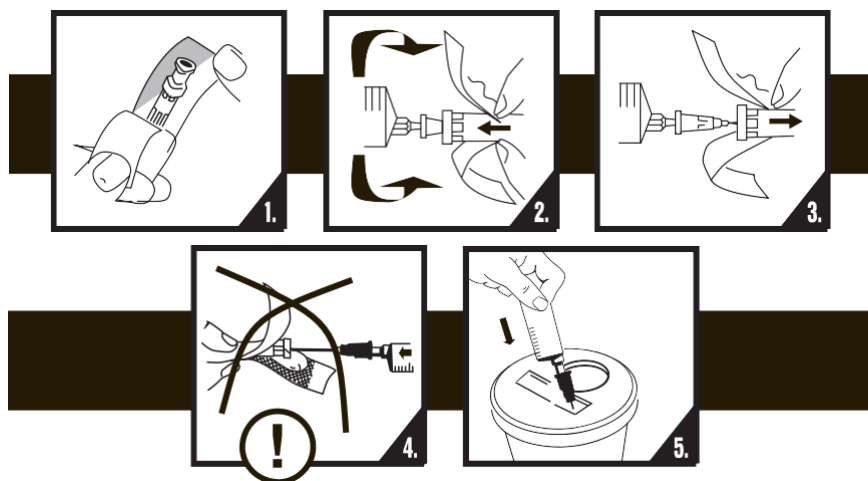

Засторога!



Озн. з інструкцією для застосування

REF:

Етал. № виробу / № позиції



Повторно викор. **ЗАБОРОНЕНО**

LOT

Код партії



Дата виготовлення



Використати до / Термін придатності

STERILE EO

Стерилізація оксидом етилену



Виробник



Довгий скіс



Короткий скіс



Не містить DEHP



Не містить PVC



Не містить латекс



Не використовувати, якщо пакування пошкоджено



Апірогенно



Оберігати від дії прямого сонячного проміння



Температурне обмеження



Не залишайте під дощем



Не залишайте під дощем



Не залишайте під дощем

HN 6-05-12/2022 Дата перевірки 23.05.2022



«CHIRANA T. Injecta, a.s.»
Площа Д-ра Швейцера, 194
916 01 Стара Тура
Словацька республіка
Тел.: +421 / 32/7709 991
Факс: +421/32/7709 956
www.t-injecta.com



Уповноважений представник в Україні
Товариство з обмеженою відповідальністю
«МЕРКУРІЙ ВЕСТ»
79029, Україна, м. Львів, вул. Антоновича, 128
тел./факс: +38 067 374-59-52
www.mercury-west.com.ua

UA.TR.126