

# Інструкція для застосування

## CHIRAFLEX Інтравенозна канюля з PTFE/PUR/FEP КАТЕТЕРОМ

### ВИКОРИСТАНІ МАТЕРІАЛИ:

PTFE або PUR або FEP, поліпропілен, поліетилен, поліоксиметилен, силіконовий каучук, нержавіюча сталь, полікарбонат, CAP і К смоли

### ЗАСТОСУВАННЯ:

- Введення рідин, наприклад, таких як розчини, парентеральне харчування, а також запровадження інших ліків.
- Підтримка гідратації та/або правильної дегідратації у пацієнтів, які не можуть приймати достатню кількість рідини перорально.
- Переливання крові або компонентів крові.

### ПРОТИПОКАЗАННЯ:

- Введення високов'язких рідин.
- Тривале переливання крові.
- Не використовуйте для пацієнтів з відомою гіперчутливістю деякі з використаних матеріалів.

### ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ:

1. Виберіть правильний розмір IV канюлі. Для введення необхідних IV рідин завжди використовуйте канюлю найменшого можливого розміру.
2. Ретельно оберіть та продезинфікуйте місце проколівання вени.
3. Перевірте цілісність упаковки канюлі та дату придатності, а потім вийміть канюлю з упаковки.
4. Зніміть ковпачок з голки та візьміться за виступ маточини голки.
5. Введіть канюлю у вену під невеликим кутом нахилу та перевірте появу крові в камері, щоб забезпечити правильне введення голки.
6. Введіть катетер у вену і одночасно витягніть голку швидко та плавним рухом паралельно шкірі. Рекомендуємо Вам у час витягування голки не обертати маточини голки (ні за годинниковою стрілкою, ні проти годинникової стрілки).
7. негайно викиньте голку в контейнер для гострих відходів.
8. Припиніть витік крові натисканням пальця на вену або над кінцем катетера.
9. Голку замініть або трубкою IV інфузійної системи або пробкою Luer Lock.
10. Крильця канюлі прикріпіть липкою стрічкою до шкіри пацієнта.
11. Місце ін'єкції накрийте стерильною пов'язкою.
12. Ліки можна вводити через шприц через ін'єкційний порт після зняття кришки з порту.
13. Кришка ін'єкційного порту повинна бути завжди закрита, якщо вона не використовується.
14. Регулярно контролюйте місце проколу вени на будь-які реакції, а також контролюйте всі з'єднання.

ПРИМІТКА: Пункти з номерами 10, 12 та 13 належать лише до I.V. канюлі з ін'єкційним портом та крильцями.

### ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

- Перед використанням прочитайте інструкцію. Виріб слід використовувати відповідно до Інструкції для застосування.
- Перед використанням перевірте цілісність виробу та упаковки та термін придатності.
- Не використовуйте ножиці або інші гострі предмети біля місця введення, щоб уникнути пошкодження або розрізу катетера.
- Не давіть і не тягніть за катетер занадто сильно, не згинайте катетер, оскільки може статися пошкодження або відокремлення від втулки.
- Уникайте введення високов'язких рідин через ін'єкційний порт (стосується лише для IV Канюлі з ін'єкційним портом).
- Виріб використовуйте відразу після відкриття блистерної упаковки.
- Не намагайтеся ввести повністю або частково витягнуту голку.
- Не використовуйте виріб, якщо упаковка відкрита або пошкоджена.
- Виріб повинен використовуватися лише кваліфікованим медичним персоналом.
- Не стерилізуйте повторно. Утилізуйте після першого використання.
- Повторне використання та очищення виробу можуть вплинути на його структурні та механічні властивості. Це може викликати інфекцію та/або інші захворювання та травми.
- Виріб повинен бути замінений або утилізований відповідно до затвердженого протоколу установи або вказівок CDC.
- Компанія Хірана Т. Інжекта а.с. не несе відповідальності за будь-які прямі, випадкові чи непрямі збитки, що виникли внаслідок повторного використання виробу.

**Хірана Т.Інжекта а.с.**  
Площа Др. Швейцера 194 916 01  
Стара Тура Словацька Республіка  
Тел.: +421/32/7709 991  
Факс: +421/32/7709 956

 [www.t-injecta.com](http://www.t-injecta.com)

**CE**  
2460

  
**CHIRANA**  
**T. Injecta**

  
**UA.TR.126**

Уповноважений представник в Україні  
Товариство з обмеженою відповідальністю  
«МЕРКУРІЙ ВЕСТ»  
79029, Україна, м.Львів, вул. Антоновича, 128  
тел./факс: +38 067 374-59-52  
[www.mercury-west.com.ua](http://www.mercury-west.com.ua)

IVCC6-04-04/2021, Дата перевірки 08.04.2021



Засторога! Ознайомитися із супр. документами



Ознайомтеся з інструкціями для застосування



Номер за каталогом



Повторно використовувати ЗАБОРОНЕНО



Код партії



Дата виготовлення



Використати до



Стерильно (оксид етилену)



Виробник



Виріб без латексу



Виріб без фталатів



Не використовуйте, якщо штучна упаковка пошкоджена



Без пірогенів



Берегти від сонячного світла



Температурне обмеження  
5°C - 35°C



Берегти від вологості