



I.V. КАНЮЛЯ БЕЗПЕЧНА (SAFETY) – Інструкція для застосування


I.V. КАНЮЛЯ С ПОРТОМ І КРИЛЬЦЯМИ

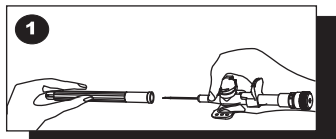


1. Зніміть ковпачок голки.

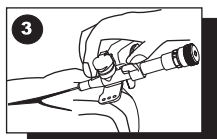


3. Вставте канюлю під невеликим кутом у вену.

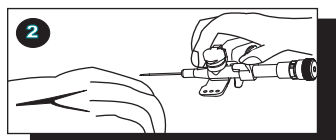


2. Візьміть канюлю за ін'єкційний порт і виступ ступиці голки.

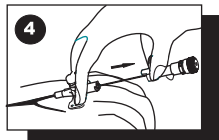

4. Акуратно витягніть голку.

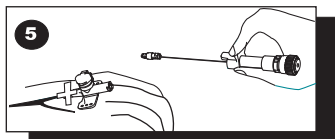


5. Вістря голки захищене ковпачком безпеки.

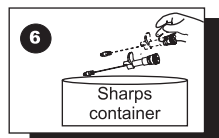


6. Голку помістіть у контейнер для гострих предметів.


I.V. КАНЮЛЯ БЕЗ ПОРТУ І БЕЗ КРИЛЕЦЬ

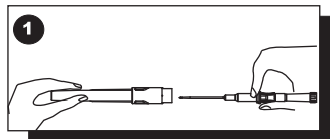


1. Зніміть ковпачок голки.

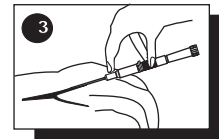


3. Вставте канюлю під невеликим кутом у вену.

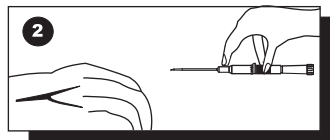


2. Тримайте канюлю скошеною стороною до верху.

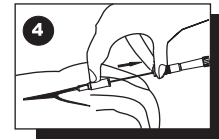

4. Акуратно витягніть голку.

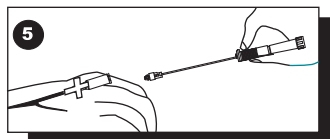

5. Вістря голки захищене ковпачком безпеки.

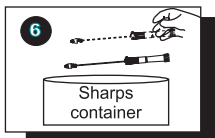

6. Голку помістіть у контейнер для гострих предметів.

Інструкція для застосування

CHIRAFLEX I.V. КАНЮЛЯ Безпечна (SAFETY) з PU/FEP КАТЕТЕРОМ

ВИКОРИСТАНИ МАТЕРІАЛИ:

PU або FEP, поліпропілен, поліетилен, поліоксиметилен і силіконовий каучук.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- Введення рідин, таких як розчини, парентеральне харчування, а також введення інших ліків.
- Підтримка гідратації та/або правильною дегідратації у пацієнтів, які не можуть приймати достатню кількість рідини перорально.
- Переливання крові або компонентів крові.

ПРОТИПОКАЗАННЯ:

- Введення високов'язких рідин.
- Тривале переливання крові.
- Не використовуйте для пацієнтів з відомою гіперчутливістю до деяких з використаних матеріалів.

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ:

1. Виберіть правильний розмір IV-канюлі. Для введення необхідних IV рідин завжди використовуйте канюлю найменшого можливого розміру.
 2. Ретельно оберіть та продезинфікуйте місце проколювання вени.
 3. Перевірте цілісність упаковки канюлі та дату придатності, а потім вийміть канюлю з упаковки.
 4. Зніміть ковпачок з голки та візьміться за виступ ступиці голки.
 5. Введіть канюлю у вену під невеликим кутом нахилу та перевірте появу крові в камері, щоб забезпечити правильне введення голки.
 6. Введіть катетер у вену і одночасно витягніть голку швидким та плавним рухом паралельно шкірі. Рекомендуємо Вам під час витягування голки не обертати ступицю голки (ні за годинникову стрілку, ні проти годинникової стрілки).
 7. негайно викиньте голку в контейнер для гострих відходів.
 8. Не намагайтеся ввести повністю або частково витягнуту голку.
 9. Припиніть витік крові натисканням пальця на вену або над кінцем катетера.
 10. Голку замініть або трубкою IV інфузійної системи або пробкою Luer Lock.
 11. Крильця канюлі прикріпіть липкою стрічкою до шкіри пацієнта.
 12. Місце ін'єкції накрийте стерильною пов'язкою.
 13. Ліки можна вводити через шприц через ін'єкційний порт після зняття кришки з порту.
 14. Кришка ін'єкційного порту повинна бути закрита, якщо він не використовується.
 15. Регулярно контролюйте місце проколу вени на предмет будь-яких реакцій, а також контролюйте всі з'єднання.
- ПРИМІТКА: Пункти з номерами 11, 13 та 14 стосуються лише до I.V. канюлі з ін'єкційним портом та крильцями.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

- Перед використанням прочитайте Інструкцію для застосування.
 - Цей виріб може використовуватися лише кваліфікованим лікарем або медичним працівником!
 - Перед використанням перевірте цілісність виробу та упаковки та термін придатності.
 - Якщо упаковка не була розкрита чи непошкоджена, то виріб стерильний, непірогенний і нетоксичний.
 - Тільки для одноразового використання. Після використання утилізуйте. Не переробляйте, не чистіть та не стерилізуйте.
 - Виріб використовуйте відразу після відкриття блистерної упаковки.
 - Виріб повинен використовуватися відповідно до інструкції для застосування.
- КОМПАНІЯ ХІРАНА Т.ІНЖЕКТА А.С. ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД БУДЬ-ЯКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА МОЖЛИВІ НАСЛІДКИ, ЗУМОВЛЕНІ НЕПРАВИЛЬНИМ ВИКОРИСТАННЯМ I.V. Канюлі.



Засторога! Ознайомитися із супр. документами



Ознайомтеся з інструкціями для застосування



Номер за каталогом



Повторно використовувати ЗАБОРОНЕНО



Код партії



Дата виготовлення



Використати до



Стерильно (оксид етилену)



Виробник



Виріб без латексу



Виріб без фталатів



Не використовуйте, якщо штучна упаковка пошкоджена



Без пірогенів



Берегти від сонячного світла



Температурне обмеження



Берегти від вологості



U.A.TR.126

Уповноважений представник в Україні
Товариство з обмеженою відповідальністю
«МЕРКУРИЙ ВЕСТ»
79029, Україна, м. Львів, вул. Антоновича, 128
тел./факс: +38 067 374-59-52
www.mercury-west.com.ua



CHIRANA
T. Injecta