


SCALP VEIN SET

CHIRAFLEX

Рекомендований спосіб застосування CHIRAFLEX
Інтравенозної канюлі тип "Метелик" одноразового використання

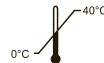

CONTAINS or PRESENCE
of PHTHALATES:
Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)



- Опис:** Система з канюлі тип "Метелик" для одноразового використання. Стерильна, нетоксична, апірогенна.
- Компоненти:** Виріб складається з канюлі, ручки, м'якої трубочки та протектора.
- Галузь застосування:** Цей виріб використовується для регулярного забору крові та/або короткочасної інфузії внутрішньовенозних рідин. Канюля тип "Метелик" надається із захисною кришкою, яку можна використовувати для закриття голки одразу після відбору крові або інфузії з метою захисту від випадкового уколу голкою. Виріб повинен використовуватися лише навченим медичним персоналом та лише відповідно до наступних інструкцій.
- Забора:** ---



- Перед використанням переконайтеся, що термін придатності стерильності, комплектність упаковки, номер партії та термін придатності у порядку;
- Вироби необхідно використовувати відразу після розкриття упаковки, а після використання утилізувати;
- У разі пошкодження упаковки, відпадання замка або закінчення терміну придатності використання не допускається;
- Якщо під час переливання сталося незвичайне явище, слід діяти відповідно до інструкції щодо клінічного застосування;
- Цей пристрій не містить фталатів DEHP;
- Вливання розчинів на базі ліпідів може збільшити ризик ендокринних порушень, тому необхідно уникати їх введення немовлятам, дітям та вагітним жінкам;
- Повторна стерилізація або повторне використання можуть спричинити інфекцію або критичні реакції.



- Перед використанням відкрийте упаковку в місці, позначеному "відкрити тут";
- Перед використанням переконайтеся, що штучне пакування не пошкоджене. Якщо виявилось, що упаковка пошкоджена, тоді виріб не використовуйте;
- Будь-яка використана голка вважається забрудненою і її необхідно викинути в спеціальну ємність для «гострих» біологічно небезпечних відходів відразу після використання;
- При використанні та утилізації руки завжди тримайте за вістря.



Хірана Т.Інжекта а.с.

Площа Др. Швейцера 194 916 01 Стара Тура
Словацька Республіка

Тел.: +421/32/7709 991 Факс: +421/32/7709 956

www.t-injecta.com



Засторога! Ознайомитися із супр.документами



Ознайомтеся з інструкціями для застосування



Номер за каталогом



Повторно використовувати ЗАБОРОНЕНО



Код партії



Дата виготовлення



Використати до



Стерильно (оксид етилену)



Виробник



Виріб без латексу



Не застосовувати, якщо штучна упаковка пошкоджена



Без пірогенів



Берегти від сонячного світла



Температурне обмеження



Берегти від вологи



UA.TR.126

Уповноважений представник в Україні
Товариство з обмеженою відповідальністю
«МЕРКУРІЙ ВЕСТ»
79029, Україна, м.Львів, вул. Антоновича, 128
тел./факс: +38 067 374-59-52
www.mercury-west.com.ua