

CHIRAFLEX

Mandrin - Luer Lock

Інструкція для застосування МАНДРЕН (Обтуратор) для одноразового використання



Non-Toxic
Non-Pyrogenic

Опис:

Обтуратор для одноразового використання. Стерильний, нетоксичний, апірогенний.

Компоненти:

Обтуратор.

Область застосування: Використовується для закриття внутрішньосудинної канюлі на тривалий термін.

Заборона: Заборонено використовувати для пацієнтів з відомою гіперчутливістю деякі з використаних матеріалів (Поліпропілен).



1. Перед використанням переконайтеся, що термін придатності стерильності, комплектність упаковки, номер партії та термін придатності в порядку;
2. Вироби необхідно використовувати відразу після розкриття упаковки, а після використання утилізувати;
3. Цей виріб може використовувати лише кваліфікований лікар або медичний працівник!
4. Лише для одноразового використання. Після використання одразу ж утилізуйте;
5. Повторна стерилізація або повторне використання можуть спричинити інфекцію або критичні реакції.



1. Залежно від розміру внутрішньосудинної канюлі, виберіть відповідний розмір обтуратора;
2. Перевірте цілісність упаковки, термін придатності. Обтуратор дістаньте із упаковки;
3. Обережно зніміть ковпачок із внутрішньосудинного катетера та вставте обтуратор у весь катетер.
4. Обтуратор повинен щільно прилягати до внутрішньосудинного катетера;
5. Перед введенням антибіотиків обтуратор вийміть.



Засторога! Ознайомитися із супр. документами



Ознайомтеся з інструкціями для застосування



Номер за каталогом



Код партії



Дата виготовлення



Використати до



Стерильно (оксид етилену)



Виробник



Повторно використовувати ЗАБОРОНЕНО



Не стерилізувати повторно



Хірана Т.Інжекта а.с.
Площа Др. Швейцера 194
916 01 Стара Тура
Словацька Республіка
Тел.: +421/32/7709 991
Факс: +421/32/7709 956
www.t-injecta.com



U.A.TR.126

Не використовуйте, якщо штучна упаковка пошкоджена



Без пірогенів



Берегти від сонячного світла



Температурне обмеження



Берегти від вологи

Уповноважений представник в Україні
Товариство з обмеженою відповідальністю
«МЕРКУРІЙ ВЕСТ»
79029, Україна, м.Львів, вул. Антоновича, 128
тел./факс: +38 067 374-59-52
www.mercury-west.com.ua