

CHIRALINE

Інструкція для застосування

Подовжувач інфузійний CHIRALINE для одноразового застосування

- Опис:** Подовжувальна трубка для одноразового застосування. Стерильна, нетоксична, апірогенна.
- Призначення:** Подовжувальна трубка призначена для приєднання та подовження інфузійних та трансфузійних систем для введення рідин та переливання крові в систему кровообігу за допомогою внутрішньовенного катетера та канюлі.
- Запобіжні заходи:** Безпечно утилізуйте подовжувальний комплект так, щоб ніхто не міг вколотися або поранитися.
- Застереження:** Утилізуйте комплект після кожного використання;
Не чистіть та не стерилізуйте повторно;
Апарат залишається стерильним аж до розтину або пошкодження упаковки;
Не використовуйте, якщо стерильна упаковка розкрита або пошкоджена;
Ніколи не використовуйте, якщо будь-яку частину від'єднано або від'єднано захисний ковпачок.
- Спосіб використання:** Відкрийте окремих пакет;
Приєднайте проксимальний конектор Luer до інфузійного шприца та зафіксуйте;
Заповніть трубку розчином. Переконайтеся, що трубка прохідна і що в інфузійній системі немає бульбашок повітря;
Приєднайте дистальний конектор Luer-Lock до венозного катетеру або ін'єкційної голки;
Інфузію виконуйте як зазвичай.

Символи, що використовуються на блістерній упаковці:

REF Номер за каталогом

LOT Код партії

 Дата виготовлення

 Використати до

 Виробник

 Ознайомтеся з інструкціями для застосування

 Повторно використовувати ЗАБОРОНЕНО

 Не використовуйте, якщо штучна упаковка пошкоджена

 Берегти від сонячного світла

 Берегти від вологи

 Без пірогенів

 Температурне обмеження

STERILE EO Стерильно (оксид етилену)

PHT DEHP З вмістом або присутністю фталатів

Повторна стерилізація: Виріб не призначений для повторної стерилізації. Виробник забороняє повторну стерилізацію.

Повторне використання: Виріб не призначено для повторного використання. Виріб призначений для одноразового використання для одного пацієнта. Виробник забороняє повторне використання. При повторному використанні не гарантована стерильність та чистота виробу (в результаті – забруднення, інфекція, травма пацієнта).

Небезпечні речовини: Якщо на штучній упаковці присутнє позначення із символами «PHT-DEHP», тоді виріб містить небезпечні речовини. Трубка є складовою подовжувального комплекту, який містить небезпечну речовину. На підставі екстерного аналізу у незалежній лабораторії трубка містить речовину DEHP = біс (2-етилгексил) фталат у середньому 26,5 масових %.

DEHP використовується як пластифікатор у медичних витратних матеріалах, таких як, наприклад, внутрішньовенні трубки та кишень, катетери, діалізні мішки та трубки, трансфузійні мішки та трубки та повітряні трубки. З цієї причини були висловлені побоювання щодо фільтратів, які переносяться пацієнтам, особливо тих, яким потрібні тривалі інфузії, наприклад, новонароджених у відділеннях інтенсивної терапії для дітей, хворих на гемofilію та пацієнтів на діалізі. За даними Наукового комітету з медичних та екологічних ризиків Європейської комісії (SCHER), вплив DEHP може перевищувати допустиме щоденне споживання для деяких конкретних груп населення, а саме для людей, які піддаються медичним процедурам, як, наприклад, нирковий діаліз.

