

Інструкція для застосування

CHIRAWAY Краник 3-ходовий стандарт

ВИКОРИСТАНІ МАТЕРІАЛИ:

Поліпропілен, Полікарбонат, HDPE.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- Введення двох ліків чи рідин одночасно.

ПРОТИПОКАЗАННЯ:

- Введення високов'язких рідин.
- Тривале переливання крові.
- Не використовуйте для пацієнтів з відомою гіперчутливістю деякі з використаних матеріалів.

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ:

1. Після зняття білої кришки (Luer Lock) приєднайте IV інфузійну систему до одного або двох портів триходового запірного крана.
2. Відкрийте роз'єм внутрішньовенних інфузійних трубок і випустіть повітря з триходового запірного крана.
3. Покажчик напрямку на ручці вказує напрямку потоку і дозволяє вводити два види рідин або ліків одночасно.
4. Поверніть ручку в закриті положення.
5. Приєднайте закінчення Male Luer до пристрою забору венозної крові м'яким поворотом з осьовим зусиллям, потім приєднайте комплект Luer Lock обертанням конектора Luer Lock.
6. Поверніть ручку у відкрите положення та налаштуйте витрати інфузійної системи.

⚠ ЗАСТОРОГА!:

- Не використовуйте, якщо упаковка відкрита або пошкоджена.
- Триходовий запірний кран використовуйте відразу після відкриття індивідуальної блістерної упаковки.
- Цей виріб може використовуватися лише кваліфікованим лікарем або медичним працівником!
- Деякі органічні розчинники, дезінфікуючі засоби на основі алкоголю, інфузійні розчини та речовини з високим значенням pH можуть спричинити утворення тріщин у матеріалі запірного крана.
- Виріб повинен використовуватися лише кваліфікованим медичним персоналом!
- Не стерилізуйте повторно. Утилізуйте після першого використання.
- Повторне використання та очищення виробу можуть вплинути на його структурні та механічні властивості. Це може викликати інфекцію та/або інші захворювання та травми.
- Виріб повинен бути замінений або утилізований відповідно до затвердженого протоколу установи або вказівок CDC.
- Компанія Хірана Т. Інжекта а.с. не несе відповідальності за будь-які прямі, випадкові або непрямі збитки, що виникли в наслідок повторного використання виробу.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

- Ліпіди можна використовувати лише з виробами Chiraway Pro.

 Хірана Т.Інжекта а.с.
Площа Др. Швейцера 194
916 01 Стара Тура
Словацька Республіка
Тел.: +421/32/7709 991
Факс: +421/32/7709 956

 www.t-injecta.com

CE
2460


CHIRANA
T. Injecta



Уповноважений представник в Україні
Товариство з обмеженою відповідальністю
«МЕРКУРІЙ ВЕСТ»
79029, Україна, м.Львів, вул. Антоновича, 128
тел./факс: +38 067 374-59-52
www.mercury-west.com.ua

CHW6-03-06/2021, Дата перевірки 02.06.2021



Засторога! Ознайомитися із
супр. документами



Ознайомтеся з інструкціями для
застосування



Номер за каталогом



Повторно використовувати ЗАБОРОНЕНО



Код партії



Дата виготовлення



Використати до

STERILE EO

Стерильно (оксид етилену)



Виробник



Виріб без латексу



Виріб без фталатів



Не використовуйте, якщо штучна
упаковка пошкоджена



Без пірогенів



Берегти від сонячного світла



Температурне обмеження



Берегти від вологи