

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ

I.V. Інфузійна система з фільтром автоматичної зупинки повітря та інфузійним фільтром

Використані матеріали:

- Поліпропілен, Акрилонітрил-бутадієн-стирол (ABS), PVC, GPPS, PTFE.

Показання:

- Інфузія внутрішньовенних (I.V.) розчинів, введення ліків та запобігання надходженню повітря в інфузійну трубку.
- Підтримка гідратації у пацієнтів, які не можуть приймати достатню кількість рідини перорально.

Протипоказання:

- Введення високов'язких рідин.
- Переливання крові.
- Забороняється використовувати для пацієнтів з відомою гіперчутливістю до будь-якого з матеріалів, що використовуються.

Інструкція для застосування:

- Вийміть I.V. інфузійну систему з упаковки, закрийте затискач (див. мал. 1).
- Підготуйте I.V. ємність.
- Зніміть захисний ковпачок із шипа. Вставте шип по всій його довжині у верхню частину I.V. ємності для рідини (див. мал. 1). Ємність повісьте.
- Натисніть на камеру крапельниці та встановіть поверхню рідини до синього кільця камери крапельниці (див. мал. 2).
- Повісьте наконечник роз'єму за допомогою паза в затиску (див. мал. 3 і 4).
- Відкрийте повітровипускню заглушку проколюючого штифта.
- Відчиніть затискач. Рідина почне текти в трубку і автоматично заливається до наконечника роз'єму завдяки функції зупинки заливки. Закрийте затискач.
- Зніміть захисну кришку з адаптера на наконечнику роз'єму та приєднайте та підключіть за допомогою венозного пристрою доступу (Див. Мал. 5 та 6).
- Інфузійна трубка повинна знаходитися поблизу пацієнта і, як мінімум, на 21 сантиметр нижче за пацієнта (див. мал. 7).
- Відкрийте затискач та відрегулюйте потік рідини за допомогою регулюючого затискача.

Попередження:

- Не використовуйте, якщо захисний замок відсутній або ослаблений.
- Не використовуйте, якщо упаковка відкрита або пошкоджена.
- Оскільки виріб виробляється масово, можуть бути присутні невеликі відхилення функцій. При підготовці інфузії необхідно дотримуватися стандартних правил безпеки. Будь ласка, завжди дотримуйтесь загальноприйнятих запобіжних заходів.
- Використовуйте місце Y (якщо це необхідно) лише для припинення ін'єкційного введення ліків асептичними методами.
- При введенні під тиском або краплями виріб сумісний і з насосом (див. мал. 8).
- Під час переривання інфузійної терапії закрийте видалення повітря.
- Інфузійний фільтр призначений лише для одноразового використання.
- Виріб повинен використовуватись лише кваліфікованим медичним персоналом!
- Не стерилізуйте повторно. Систему після використання утилізуйте.
- Повторне використання та чищення виробу може вплинути на його структурні та механічні властивості. Може спричинити інфекцію або інші захворювання та травми.
- Виріб повинен бути замінений або утилізований відповідно до затвердженого протоколу установи або інструкцій CDC.
- Зберігайте при кімнатній температурі, уникайте надмірного нагрівання, захищайте від прямих сонячних променів та вологи.
- Компанія Хірана Т. Інжекта а.с. не несе відповідальності за будь-які прямі, випадкові або непрямі збитки, що виникли внаслідок повторного використання виробу.



Хірана Т.Інжекта а.с.
Площа Др. Швейцера 194
916 01 Стара Тура
Словацька Республіка
Тел.: +421/32/7709 991
Факс: +421/32/7709 956



U.A.TR.126

Уповноважений представник в Україні
Товариство з обмеженою відповідальністю
«МЕРКУРІЙ ВЕСТ»
79029, Україна, м.Львів, вул. Антоновича, 128
тел./факс: +38 067 374-59-52
www.mercury-west.com.ua



CHIRANA
T. Injecta



Засторога! Ознайомитися із супр.документами



Ознайомтеся з інструкціями для застосування



Номер за каталогом



Повторно використовувати ЗАБОРОНЕНО



Не стерилізувати повторно



Не використовуйте, якщо штучна упаковка пошкоджена



Код партії



Дата виготовлення



Використати до



Стерильно (оксид етилену)



Температурне обмеження



Виробник



Без пірогенів



Виріб без фталатів



Виріб без латексу