

CHIRANEM

Інструкція для застосування Системи для переливання крові CHIRANEM одноразового використання



Опис: Система для переливання крові для одноразового застосування. Стерильна, нетоксична, апірогенна.

Компоненти: Виріб складається з кришки пристрою для проколювання кришки, пристрої для проколювання кришки, трубки, крапельного мішка, крапельної трубки, фільтра крові, регулятора-затискача, комплекту з голкою-метеликом і т.д. Можна вибрати різні розміри голок.

Галузь застосування: Використовується для клінічного переливання крові та є складовою медичної допомоги.


Заборона: Використовується лише для переливання крові.



- Перед використанням переконайтеся, що термін придатності стерильності, комплектність упаковки, номер партії та термін придатності у порядку;
- Вироби необхідно використовувати відразу після розкриття упаковки, а після використання утилізувати;
- У разі пошкодження упаковки, відпадання замка або закінчення терміну придатності використання не допускається;
- Якщо під час переливання сталося незвичайне явище, слід діяти відповідно до інструкції щодо клінічного застосування;
- Цей пристрій містить фталати (presense DEHP);
- Тривале використання систем для переливання крові, що містять DEHP, у немовлят, дітей та вагітних жінок може спричинити підвищення ризику порушень ендокринної системи;
- Повторна стерилізація або повторне використання можуть спричинити інфекцію або критичні реакції;
- Система для переливання крові з Flashball містить LATEX та позначена символом 



- Перед використанням відкрийте упаковку в місці, позначеному "відкрити тут";
- Закрийте регулятор витрати, зніміть кришку з пристрою для проколювання кришки, покладіть пристрій для проколювання кришки в пакет для переливання і переконайтеся, що протікання немає;
- Натисніть пальцями на камеру крапельниці та зачекайте, доки камера не наповниться до половини кров'ю;
- Відкрийте регулятор-затискач, випустіть повітря, спостерігайте за утворенням крапель та починайте переливання;
- Перед використанням надійно вставте голку та запобігайте витокі.

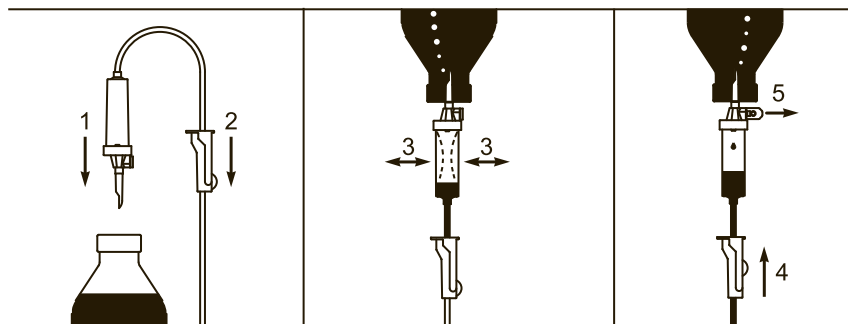

- | | | | |
|---|---|---|--|
|  | Засторога! Ознайомитися із супр.документами |  | Не використовуйте, якщо штучна упаковка пошкоджена |
|  | Ознайомтеся з інструкціями для застосування |  | Без пірогенів |
|  | Номер за каталогом |  | Рідинний фільтр з розміром пор |
|  | Код партії |  | Кількість крапель на мл |
|  | Дата виготовлення |  | Берегти від сонячного світла |
|  | Використати до |  | Температурне обмеження |
|  | Стерильно (оксид етилену) |  | Берегти від вологи |
|  | Виробник | | |
|  | Повторно використовувати ЗАБОРОНЕНО | | |
|  | Виріб без латексу | | |
|  | З вмістом або присутністю каучуку LATEX | | |



Хірана Т.Інжекта а.с.
Площа Др. Швейцера 194 916 01 Стара Тура
Словацька Республіка
Тел.: +421/32/7709 991 Факс: +421/32/7709 956
www.t-injecta.com



UA.TR.126

Уповноважений представник в Україні
Товариство з обмеженою відповідальністю
«МЕРКУРІЙ ВЕСТ»
79029, Україна, м.Львів, вул. Антоновича, 128
тел./факс: +38 067 374-59-52
www.mercury-west.com.ua