

CHIRANEM

Інструкція для застосування Системи для переливання крові CHIRANEM одноразового використання



Опис: Система для переливання крові для одноразового застосування. Стерильна, нетоксична, апірогенна.

Компоненти: Виріб складається з кришки пристрою для проколювання кришки, труби, крапельного мішка, крапельної трубки, фільтра крові, регулятора-затискача, комплекту з голкою-метеликом і т.д. Можна вибрати різні розміри голок.

Галузь застосування: Використовується для клінічного переливання крові та є складовою медичної допомоги.


Забораона: Використовується лише для переливання крові.



- Перед використанням переконайтеся, що термін придатності стерильності, комплектність упаковки, номер партії та термін придатності у порядку;
- Вироби необхідно використовувати відразу після розкриття упаковки, а після використання утилізувати;
- У разі пошкодження упаковки, відпадання замка або закінчення терміну придатності використання не допускається;
- Якщо під час переливання сталося незвичайне явище, слід діяти відповідно до інструкції щодо клінічного застосування;
- Цей пристрій не містить фталатів (БЕЗ ФТАЛАТІВ);
- Повторна стерилізація або повторне використання можуть спричинити інфекцію або критичні реакції;
- Система для переливання крові з Flashball містить LATEX та позначена символом.



- Перед використанням відкрийте упаковку в місці, позначеному "відкрити тут";
- Закрийте регулятор-затискач, зніміть кришку з пристрою для проколювання кришки, введіть пристрій для проколювання кришки в пакет для переливання і переконайтеся, що протікання немає;
- Натисніть пальцями на камеру крапельниці та зачекайте, доки камера не наповниться до половини кров'ю;
- Відкрийте регулятор-затискач, випустіть повітря, спостерігайте за утворенням крапель та починайте переливання;
- Перед використанням надійно вставте голку та запобігайте витокі.

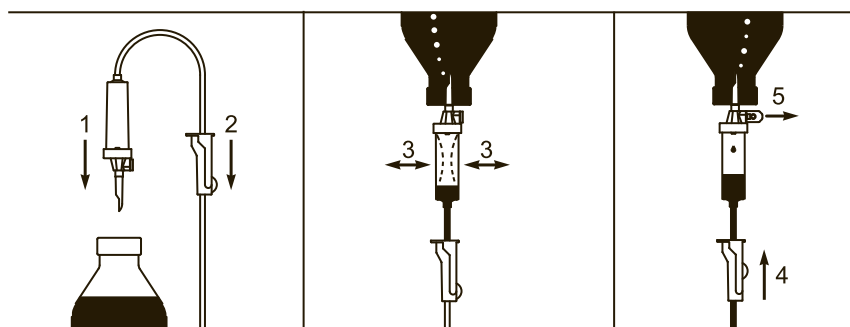

Засторога! Ознайомитися із супр. документами



Ознайомтеся з інструкціями для застосування



Номер за каталогом



Код партії



Дата виготовлення



Використати до



Стерильно (оксид етилену)



Виробник



Повторно використовувати ЗАБОРОНЕНО



Виріб без латексу



З вмістом або присутністю каучуку LATEX



Не використовуйте, якщо штучна упаковка пошкоджена



Виріб без фталатів



Без пірогенів



Рідинний фільтр з розміром пор



Кількість крапель на мл



Берегти від сонячного світла



Температурне обмеження



Берегти від вологи



Хірана Т.Інжекта а.с.
Площа Др. Швейцера 194 916 01 Стара Тура
Словацька Республіка
Тел.: +421/32/7709 991 Факс: +421/32/7709 956
www.t-injecta.com



UA.TR.126

Уповноважений представник в Україні
Товариство з обмеженою відповідальністю
«МЕРКУРІЙ ВЕСТ»
79029, Україна, м.Львів, вул. Антоновича, 128
тел./факс: +38 067 374-59-52
www.mercury-west.com.ua