

CHIRAPLUS

Інструкція для застосування Системи для переливання інфузійного розчину CHIRAPLUS одноразового використання



Опис: Інфузійна система для одноразового застосування. Стерильна, нетоксична, апірогенна.

Компоненти: Інфузійний набір для одноразового застосування. Виріб складається з кришки пристрою для проколювання кришки, труби, крапельного мішка, крапельної трубки, фільтра крові, регулятора-затискача, комплекту з голкою-метеликом і т.д.

Галузь застосування: Використовується у клінічній практиці для внутрішньовенних вливань, є складовою медичного лікування.


Заборона: Заборонено використовувати для переливання крові та липких розчинів.



- Перед використанням переконайтеся, що термін придатності стерильності, комплектність упаковки, номер партії та термін придатності у порядку;
- Вироби необхідно використовувати відразу після розкриття упаковки, а після використання утилізувати;
- У разі пошкодження упаковки, відпадання замка або закінчення терміну придатності використання не допускається;
- Якщо під час переливання сталося незвичайне явище, слід діяти відповідно до інструкції щодо клінічного застосування;
- Цей пристрій містить фталати DEHP;
- Вливання розчинів на базі ліпідів може збільшити ризик ендокринних порушень, тому необхідно уникати їх введення немовлятам, дітям та вагітним жінкам;
- Повторна стерилізація або повторне використання можуть спричинити інфекцію або критичні реакції;
- Інфузійна система з Flashball містить LATEX та позначена символом.



- Перед використанням відкрийте упаковку в місці, позначеному "відкрити тут";
- Закрийте регулятор-затискач, зніміть кришку з пристрою для проколювання кришки, введіть пристрій для проколювання кришки в пакет для інфузії і переконайтеся, що протікання немає;
- Натисніть пальцями на камеру крапельниці та зачекайте, доки камера не наповниться до половини інфузійного розчину;
- Відкрийте регулятор-затискач, випустіть повітря, спостерігайте за утворенням крапель та починайте переливання;
- Перед використанням надійно вставте голку та запобігайте витокі.

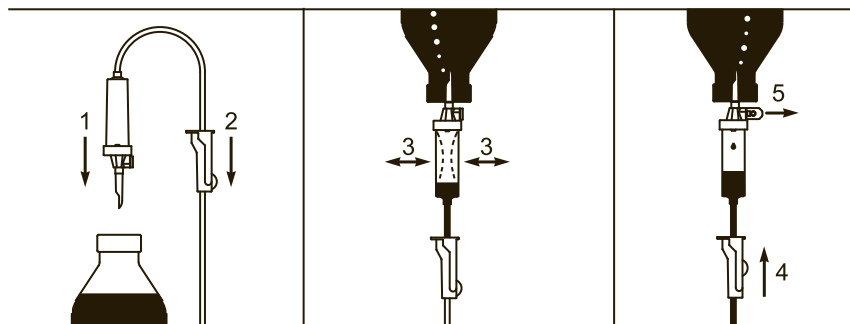

Засторога! Ознайомитися із супр. документами



Ознайомтеся з інструкціями для застосування



Номер за каталогом



Код партії



Дата виготовлення



Використати до



Стерильно (оксид етилену)



Виробник



Повторно використовувати ЗАБОРОНЕНО



Виріб без латексу



З вмістом або присутністю каучуку LATEX



Не використовуйте, якщо штучна упаковка пошкоджена



Без пірогенів



Рідинний фільтр з розміром пор



Кількість крапель на мл



Берегти від сонячного світла



Температурне обмеження



Берегти від вологи



Хірана Т.Інжекта а.с.

Площа Др. Швейцера 194 916 01 Стара Тура
Словацька Республіка

Тел.: +421/32/7709 991 Факс: +421/32/7709 956

www.t-injecta.com



Уповноважений представник в Україні
Товариство з обмеженою відповідальністю
«МЕРКУРІЙ ВЕСТ»
79029, Україна, м.Львів, вул. Антоновича, 128
тел./факс: +38 067 374-59-52

UA.TR.126

www.mercury-west.com.ua