

3-х компонентний шприц одноразового використання, Жане, Катетерний тип, 150мл.



Цільове призначення:


Виріб призначений для промивання поверхонь тіла та його порожнин (вуха, носоглотки і прямої кишки), також він може бути використаний для введення рідкої їжі. Виріб поставляється в нестерильному виконанні.

Попередження:

При зборі шприца, поршень разом з ущільнювачем, необхідно вставляти в циліндр під кутом, приблизно 20°. На відстані 1/3 циліндра, поршень повинен бути заведений вгору в горизонтальне положення (дивись малюнок).

Стерилізація:

Розібравши та ретельно очистивши шприц, стерилізуємо в автоклаві при температурі до 120°C впродовж 20 хвилин. Холодним газом (етилен оксидом), або парами 0,5% розчину надцтової кислоти. Після стерилізації, перед введенням поршня в циліндр, необхідно змазати гумове кільце (ущільнювач) силіконовим покриттям для медичних пристроїв.

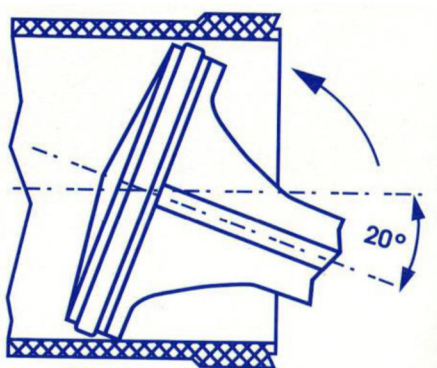

Нестерильно



Озн. з інструкцією для застосування



Етал. № виробу / № позиції



Код партії



Дата виготовлення



Використати до/Термін придатності



Виробник



Не містить DEHP



Не містить PVC



Не містить латексу



Оберігати від дії прямого сонячного проміння



Температурне обмеження



Не залишайте під дощем



Обережно, крихке!



CHIRANA T. Injecta, a.s.
 Nám. Dr. Schweitzera 194
 916 01 Stará Turá
 Slovak Republic
www.t-injecta.com



Уповноважений представник в Україні / служба споживачів:
 Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕРКУРІЙ ВЕСТ»
 79057, Україна, м. Львів, вул. Антоновича, 128
 Тел./факс: +38 (032) 244-244-0 www.medservis.com.ua